

ラングフルート・セラピューティック

【警告】

(適用対象 (患者))

- ・本品の使用前には添付文書および取扱説明書を熟読すること。
 - ・医師もしくは医師の指示を受けた専門の医療従事者は患者に適切な指導を行うこと。
 - ・過度な呼気の吹き込みは過換気症、発作などの悪影響を及ぼす可能性がある。
 - ・各患者に適切な使用方法は、専門の医療従事者が判断すること
- [患者に吹き込み方法の適切な指導をしなかったり、セットの間の休息を十分に取らなかったりした場合、
(不具合・有害事象)の項の有害事象を引き起こす可能性があるため。]

【禁忌・禁止】

(使用方法)

- ・本品は個人使用に限り、複数の患者に使用しないこと。
- ・本品を通じて息を吸い込まないこと。

【形状・構造及び原理等】


1. 原材料

No	構成部品	原材料
①	チューブ	スチレン-ブタジエン共重合体 (K-R e s i n K R 0 1)
②	マウスピース	スチレン-ブタジエン共重合体 (K-R e s i n K R 0 1)
③	リード	ポリエチレンテレフタレート (M y l a r)


・未滅菌

2. 形状・構造及び寸法

(1)本品の写真

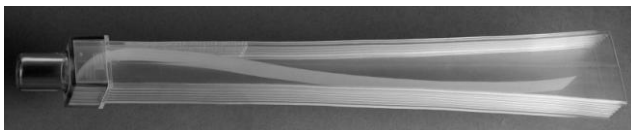

(2)構造・寸法

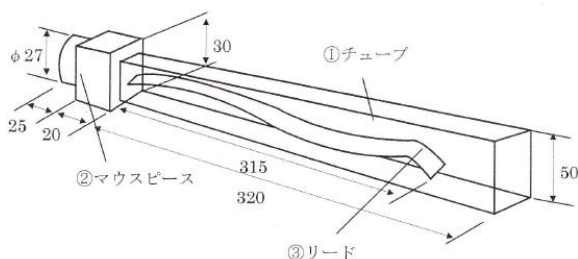

(単位: mm)

3. 原理

患者がこの器具に一定以上の呼気を吹き込むと、チューブの中のリードが振動し、明らかな振動音と同時に 16~25Hz の低周波の音波を発生させる。この低周波の音波は、肺及び気道内の分泌物及び繊毛を本来の動作周波数付近にて共鳴振動させ、気道内の分泌物の粘性を適切にし、さらに繊毛振動による粘液運搬能を高めて、患者の排痰を促す。

【使用目的又は効果】

本品は一定以上の呼気流量を吹き込むことで音波を発生し、それによって患者の気道および肺に刺激を与え排痰を促進し、換気を改善する。

【使用方法等】

始める前: 準備と姿勢

1. 使用後に飲むために、コップに水を入れておきます。
2. 気道が音波で振動して、粘液が和らげられ、次第に自分の力で動き出し、肺の中から押し出される状態をイメージします。
3. リラックスします。背中をまっすぐにして、椅子の背にもたれかからないように座り、頭を少し下に傾けて咽(のど)と気道をゆったりと開くようにします。そうすると、本品から気道の奥の方まで音波が伝わります。
ベッドの上で本品を使う場合は、できるだけ背中をあげて座り、息を吐き出すのに無理のないようにしてください。

ステップ1: 粘液を和らげ、動かすために

1. 通常より少し深く息を吸い込みます。唇をまるめ、周りから空気が洩れないように、マウスピース全体をすぼりと銜(くわ)えます。
2. 頬を膨らますことをイメージして、ローソクの火を吹き消すときのように本品に息を吹き込みます。
3. 次に、口からマウスピースを離して再び素早く息を吸い込み、再び本品に吹き込みます。2回吹き込んだら必ず普通の呼吸を2回以上行って休んでください。
4. この動作を繰り返します。2回の吹き込みと休息を1セットとして、合計20セット続けます。頬を膨らませる感じで、ローソクの火を吹き消すように本品に息を吹き込むことに集中して、中のリードがはためくようにしてください。
ただし、ペースはゆっくりでも結構です。強く息を吹き込むために腹筋に力をいれたり、のどを痛めることがないように、また、無理して咳き込むことがないようにご注意ください。
本品を吹く動作の繰り返しによって、粘液は柔らかくなり排出しやすくなってきます。

<ポイント>

- ・息を吸い込むときは本品を口からはずしてください。
- ・本品の先端を水平より少し床の方へ向けると、より効果的です。
- ・本品を使用中にめまいや息切れがしたら、少し吹き込みの力を弱めたり、2回の吹き込みの間隔を長めにとってみてください。
- ・回数は20回より多くても問題ありません。20回は一応の目安です。
- ・吹き込みが終わったあと、コップ一杯の水を飲んでください。

ステップ2: 痰を吐き出す

1. 本品が発する音波によって自然に痰がのどの奥に集まり、吐き出たくなります。無理やり咳をせずに自然に痰が出てくるのを待ちます。この間、唾は飲み込んでくださ

い。

2. 使用後 5 分～10 分くらいすると痰がのどの奥に集まってくるので、せきをして洗面所などに吐き出してください。もちろん、痰は飲み込んでしまっても結構です。本品が発する音波によって自然に、痰がのどの奥に集まり、はき出したくなります。無理やりせきをしないで、自然に痰が出てくるのを待ちます。

＜アドバイス＞

- ・本品を使い始めて初期のころ、あるいは多量の痰が気道内にあった場合には、のどの奥に多くの痰が上がってきて不快感を感じる場合がありますが、これは普通の事で異常ではありません。水を飲む事で、痰が洗い流され、のどの不快感の解消を助けます。
- ・使用時間の長さについて
肺の状態や症状にもよりますが、通常、吹き込み開始から痰を吐き出すまでに 10 分から 15 分ほどかかります

使用の時間や頻度について

本品をどのくらい長く、またどのくらいの頻度で使うのかは、医師の先生のアドバイスに従ってください。一般的には朝と、夕方または就寝前の一 日 2 回がおすすめです。肺の状態や症状の度合いにもよりますが、一回 10 分から 15 分間の使用が一般的です。

【使用上の注意】

〈使用注意〉

使用開始を判断する際、以下の事項に注意すること。

- ・呼吸仕事量増加に対する不耐
- ・顔面、口腔及び頭蓋の手術や外傷
- ・食道手術
- ・未治療の気胸
- ・鼓膜損傷、その他の中耳の病変や疑い
- ・血圧不安定
- ・急性副鼻腔炎
- ・鼻血
- ・進行性咯血
- ・悪心

〈重要な基本的注意〉

- ・包装の破損したものは使用しないこと。
- ・使用前に外観上異常がないことを確認し、異常のあるものは使用しないこと。
- ・電子レンジに入れないこと。熱で変形する恐れがあります。
- ・複数患者には使用しないこと [感染の恐れがあるため]。
- ・洗浄をする場合は、使用者の責任において、洗浄状態を確認すること。
- ・本品に汚れや異物が無いことを確認すること。
- ・すべての部品の組立が確実であることを確認すること。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような有害事象が考えられる。

- ・低換気や高二氧化碳血症の原因となる呼吸仕事量の増加
- ・胸部不快感
- ・咽頭痛
- ・気管支収縮

〈その他の注意〉

◎本品使用後廃棄時には、関係法令を遵守し、適切に廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温多湿を避けて室温で保管すること

【保守・点検に係る事項】

〈洗浄方法〉

- ・本品を清潔に保つため、必要に応じて洗浄してください。
- ・リードは消耗品です。個人用として通常 20 回から 30 回（毎日使用した場合、約 2 週間）の使用ができます。それ以降は効果が落ちてきますので、交換時期がきたら、必ずあたらしいリードに交換してください。

〈分解方法〉

1. 色のついたマウスピースを少し揺さぶりながら引っぱることで本品から取り外します。
2. 本品からマウスピースを取り外したあと、プラスチックのリ

ードをチューブから取り出します。リードを続けて使う場合は、ウェットティッシュなどで拭いて軽くクリーニングしてください。

〈洗浄方法〉

- ・まず最初に必ず手をお洗いください。

以下の方法で洗浄できます。

- ・通常の液体食器用洗剤および柔らかいスポンジを用いて洗浄したのち、水道水で十分にすすぎ洗いし、風通しの良いところで自然乾燥させます。
- ・食器洗浄機
食器洗浄機で洗う場合、チューブとマウスピースを一番上のラックにおいて洗浄すること。

〈洗浄時の注意〉

- ・本品に傷の付くようなブラシや研磨パッドなどは使用しないでください。
- ・組み立てる前に、マウスピース及びプラスチックチューブが完全に乾いたことを確認してください。

〈組み立て方法〉

1. リードをチューブにすべり込ませます。リードは末広がりになっていますので、広いほうの端をまず差し入れてから、角度を少しつけながら最後まで入るように差し込みます。
2. リードの狭いほうの端はわずかに折り目があります。この端をチューブのガイドにあわせませます。折り目の谷の部分がチューブに当たるようにリードをつけてください。
3. マウスピースをラングフルートのチューブに取り付けます。マウスピースの溝とチューブ側の溝とが合うように向きに気をつけて最後までしっかりと差し込んでください。
リードが動かないように親指で押さえながら差し込むと組み立てやすくなります。

【包装】

1005-02 ラングフルート・セラピューティック

1002-02 ラングフルート 交換用リード

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社アコースティックイノベーションズ

東京都府中市小柳町 5 - 8 - 100

電話：042-319-2144

2. 製造業者

Polymer Conversions, Inc.

製造国：米国