

## <パッケージ内容>

マウスピース	10 個
リード	14 枚
取扱説明書	1 冊 (この冊子)



製造元: メディカルアコースティックスエルエルシー

米国ニューヨーク州バッファロー市  
エリコットストリート640, NY14203

[www.lungflute.com](http://www.lungflute.com)

輸入元・連絡先:

(株)アコースティックイノベーションズ  
〒183-0013

東京都府中市小柳町5-8-100

TEL:042-319-2144 FAX:042-319-2855

**REF** 1006-02

ラングフルート、Lung Fluteはメディカルアコースティックエルエルシー(米国)の登録商標です。

©(株)アコースティックイノベーションズ 2016年9月

### 取扱説明書


この取扱説明書を必ずお読みのうえ、使用方法（注意）に従って使用してください。また、ラングフルートを使用するときは、ラングフルート〈喀痰誘発デバイス〉の取扱説明書をお読みください。

#### ■ 消耗品キットについて

ラングフルートのリードとマウスピースは個人使用となっており、他の患者さんに再使用はできません。本消耗品キットには交換用リード14枚とマウスピース10個が入っています。

ラングフルートの本体（チューブ）は、既定の方法で洗浄、消毒したうえで再使用できます。ただし、チューブが見た目にもわかる程度まで傷ついたり変色したときは、新しいラングフルートと交換してください。

※医師および医療関係者の皆様へ  
ラングフルートや消耗品キット、およびこの取扱説明書の内容に関してのご質問は、この説明書の最後に記載されている製造販売元へご連絡ください。

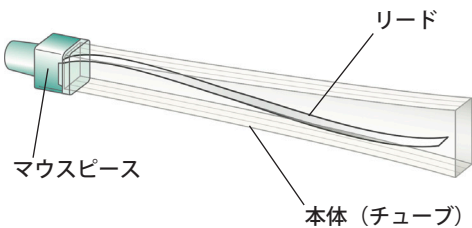

#### ■ 使用方法


##### マウスピースとリードの交換

##### 注意

- マウスピースとリードは衛生上の理由から、再使用できません。とくに本体（チューブ）をほかの人と共用する場合は、必ず新しいマウスピースとリードに取り換えてから使ってください。

##### 1. マウスピースを取り外す


マウスピースを少し揺すりながら引っ張り、チューブから取り外します。

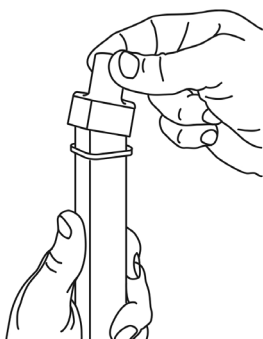

- チューブは無色半透明、マウスピースは薄青色のプラスチック製です。

## 2. リードを抜き取る

リードは端をチューブとマウスピースの間にはさんで固定されています。リードを指でつまんで抜き取ります。

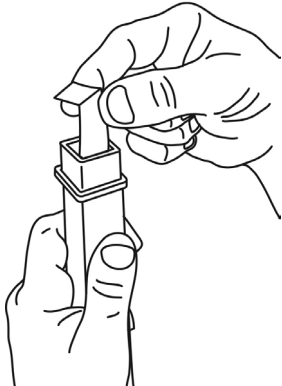

## 3. チューブを洗剤と水で洗う

チューブを洗剤とブラシを使ってしっかり洗い、その後流水でよくすすぎます。


## 2. 70℃～77℃で30分間低温消毒処理を行う

パスツリゼーションを行える機器を用い、70～77℃で30分間消毒処理を行います。\* つぎに清潔な場所でよく乾燥させます。

\* 米国疾病管理センター（CDC）による「医療施設における消毒と滅菌のガイドライン 2008」55 ページ参照


## 5. 新しいリードを入れる

パッケージから新しいリードを1枚取り出し、マウスピースを付ける側からチューブに入れます。リードは末広がりになっていますから、広いほうの端をまず差し入れ、角度をつけながら最後まで入るように差し入れます。

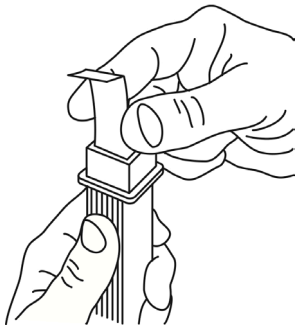



## 6. リードを折り返す

リードの狭いほうの端には、わずかに折り目が付けられています。この端をチューブ側のガイドに合わせます。この際リードをきつく折ってしまわないようにご注意ください。リードがはためきにくくなってしまうます。

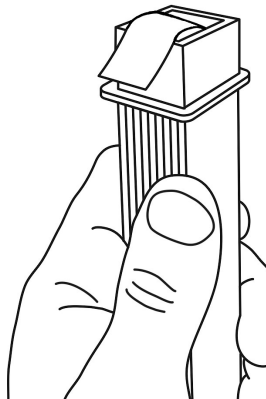

## 7. 新しいマウスピースを取り付ける

パッケージから新しいマウスピースを1個取り出し、チューブに取り付けます。リングフルートに溝がある場合は、マウスピース側の3本の溝とチューブ側の3本の溝が合うように、向きに気をつけて最後までしっかりと差し込みます。

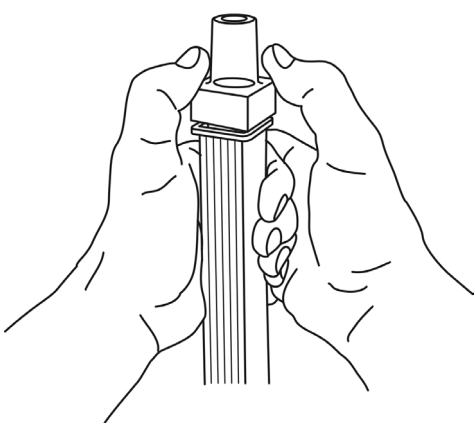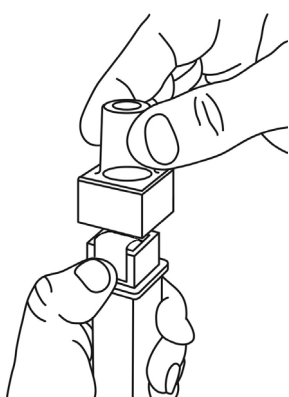

### アドバイス

- このときリードが動かないように、親指などで軽く押さえながら差し込むとやりやすいでしょう。

### 注意

- リードやマウスピースを取り付けるときは、破損させないように注意してください。リードを折り曲げたり傷つけたり、またマウスピースが割れた場合は、すぐ新しいものに交換してください。

## 8. 使用済みのマウスピースとリードを廃棄する

使用済みのマウスピースとリードは、プラスチックごみとして廃棄できます。